

GENNY ZERO – SCHNELLSTART

1



Der GENNY ZERO MD startet im Zustand „AUS“: Parksystem inaktiv, Steuerrohr auf mittlerer Höhe.

Sind die Akkus noch nicht eingesetzt:

Heckklappe öffnen und Akkus einlegen – das Gerät fährt danach von selbst hoch.

Sind die Akkus bereits eingesetzt und das Gerät ist aus:

„STOP“-Taste gedrückt halten.

2



Sobald das Display aufleuchtet, stehen zwei Wege offen:

über die ON/OFF-Taste am Cockpit-Display lässt sich das Gerät wieder abschalten, oder es wird wie folgt gestartet:



Genny in die Waagerechte bringen.

Die Bildschirmanzeige passt sich automatisch an.



Die „PFOTEN“-Taste zweimal betätigen, damit die Stützbeine ausfahren.



Genny steht jetzt im Modus „**PARK**“.

GENNY ZERO – SCHNELLSTART

3



„PFOTEN“-Taste gedrückt halten – das Steuerrohr senkt sich vollständig ab, bis es nicht mehr sichtbar ist.



4



Platz auf Genny nehmen.

Hinweis: Gehfähige Nutzer sollten das Fußbrett erst belasten, nachdem sie auf dem Sitzkissen Platz genommen haben – nicht schon beim Aufsteigen.

GENNY ZERO – SCHNELLSTART

5



„PFOTEN“-Taste gedrückt halten, bis das Steuerrohr vollständig ausgefahren ist und stehen bleibt.

6




Zentrale Entriegelungstaste betätigen und die Lenkergriffe aufklappen.



Die Griffe stehen anschließend waagrecht und einsatzbereit.

7

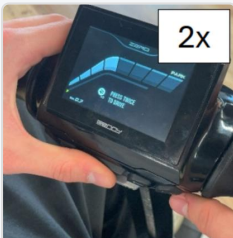

„PFOTEN“-Taste zweimal drücken, um die Stützbeine wieder einzufahren.

Genny wechselt damit in den Fahrmodus „**GUIDA**“.

GENNY ZERO – SCHNELLSTART

BEDIENUNG

Schnellzugriffs-Menü

1



Wiederholtes Drücken der „STAR“-Taste blättert durch die einzelnen Seiten des Schnellzugriffs-Menüs.



Seite 1:

Blinker links/rechts sowie Warnblinkanlage lassen sich hier aktivieren.



Seite 2:

Beleuchtung manuell ein-/ausschalten oder auf Lichtautomatik stellen.



Seite 3:

Der „SCHILDKRÖTE“-Modus begrenzt die Höchstgeschwindigkeit und macht Lenkung sowie Ansprechverhalten spürbar sanfter.



Seite 4:

Hier lässt sich der Neigungswinkel der Balance justieren, um die Ruheposition im Stand individuell einzustellen.

Hinweise: Ab 3 km/h ist der Zugriff auf das Menü gesperrt.

Die Blinker lassen sich oberhalb dieser Geschwindigkeit trotzdem auslösen – dazu einfach mit dem Finger horizontal über das Display wischen.

GENNY ZERO – SCHNELLSTART

BEDIENUNG Parkvorgang



Geschwindigkeit reduzieren, anhalten und eine stabile Balanceposition im Stand einnehmen.



„PFOTEN“-Taste zweimal drücken – die Stützbeine fahren aus.

→ Genny wechselt in den Modus „**PARK**“.

Hinweis: Jetzt kann das Steuerrohr abgesenkt und der Umstieg vorgenommen werden.

BEDIENUNG Gerät ausschalten



Sobald niemand mehr auf Genny sitzt, wird die ON/OFF-Taste am Cockpit-Display aktiv.

Zum Ausschalten:

ON/OFF-Taste betätigen
Kurz warten



Hinweis:

Bleibt Genny unbenutzt stehen, schaltet sich das Gerät nach wenigen Minuten von selbst ab.

GENNY ZERO – SCHNELLSTART


BEDIENUNG Assistiertes Schieben „SERVOGUIDA“

1



Genny zunächst in den Modus „PARK“ bringen, Stützbeine ausgefahren – die Position des Steuerrohrs spielt dabei keine Rolle.

2

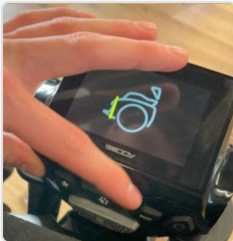

Beide Tasten kombiniert betätigen:
„STOP“ **halten**
„PFOTEN“ **zweimal drücken**



Das Gerät wechselt in den Zustand „AUS“ – Stützbeine eingefahren, Steuerrohr auf mittlerer Höhe.

In diesem Zustand lässt sich Genny bei abgeschalteten Motoren von Hand schieben.

3



Kurz auf das Sitzkissen drücken.

Genny wechselt damit in den Modus „**SERVOGUIDA**“:

Die Motoren laufen, und das Gerät hält selbstständig die Balance, auch ohne aufsitzenden Nutzer.

Ein leichter Druck am Steuerrohr genügt, um es fortzubewegen.

Hinweis – Rückkehr in den Modus „PARK“:

„STOP“-Taste drücken und das Gerät dabei waagrecht halten.

Anschließend die „PFOTEN“-Taste zweimal betätigen, um die Stützbeine wieder abzusenken.